


ディスポーザブルエアー針の使用法

薬液瓶から点滴静注する際、瓶内に通気するために使用する針です。
滅菌済みですので、そのまま直ちに使用できます。

ディスポーザブルエアー針の構造〈96mm・135mm共通〉

針の長さは96mmと135mmの2種類があります。

投与する製品の規格により、使用する針の長さが異なりますので
ご使用になる製品に合わせてお選びください。

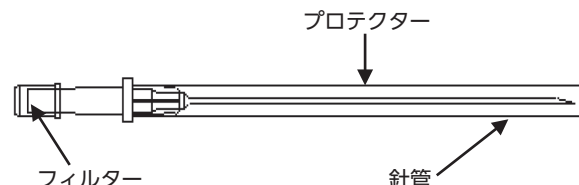

19G×96mm (50mL・100mL 瓶用)


献血ヴェノグロブリンIH 10%静注	5g/50mL 10g/100mL
献血ヴェノグロブリンIH 5%静注	5g/100mL
献血アルブミン 5%静注「JB」	5g/100mL
献血アルブミン 20%静注「JB」	10g/50mL
献血アルブミン 25%静注「ベネシス」	12.5g/50mL
赤十字アルブミン 25%静注	12.5g/50mL
ハプトグロビン静注「JB」	2000単位/100mL

19G×135mm (200mL・250mL 瓶用)

献血ヴェノグロブリンIH 10%静注	20g/200mL
献血アルブミン 5%静注「JB」	12.5g/250mL

使用方法

- ① 投与する製品のゴム栓に輸液セットの瓶針を刺し、バイアルをさかさまにつるしてください。
- ② ディスポーザブルエアー針のプロテクターを外し、フィルター部の先端（通気部）を親指で押さえた状態で、輸液セットの瓶針刺入部とは別の部位に針を下からまっすぐ差し込んでください。
- ③ ディスポーザブルエアー針の針先が液面上に出たことを確認してから、指をはなしてください。（右図参照）

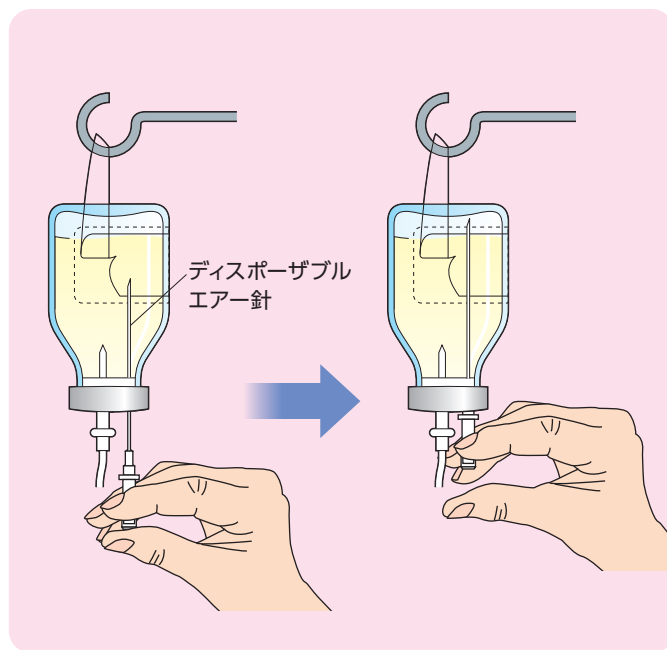

ご注意

- 必ず輸液セットの瓶針を刺した後に、ディスポーザブルエアー針を刺入してください。（瓶内が陽圧の状態では針を刺しますと、液漏れを起こす可能性があります。）
- フィルターは外さないでください。
- 包装袋が破損している場合は使用しないでください。
- ご使用は1回限りの使い捨て製品です。再使用しないでください。

■ お問い合わせ先 ■

くすり相談室 電話 0120-853-560
受付時間：月曜～金曜日 9：00～17：00
（祝日、弊社休業日を除く）

ディスポーザブルエアー針の使用法の動画を、
右記のQRコード、または下記URLからご覧いただけます。
<https://www.jbpo.or.jp/med/di/movie/vng/01/>

