

患者の皆様及びご家族の方々へ


クロスエイトMC用溶解移注針の 仕様が一部変わります

貼付シールの変更について

「クロスエイトMC用輸注セット」に同包されている製剤溶解用の移注針（イージーアクセス）につきまして、貼付しているシールの形状並びにミシン目を変更しました。これにより、製剤溶解後の溶解移注針の切り離しがこれまでより容易におこなえます。



<変更前>

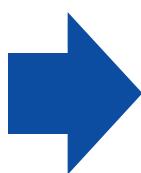


<変更後>

溶解移注針の切り離し（輸注セット使用方法説明書抜粋）

7 溶解移注針を切り離します。

製剤ビンを下にしたまま、溶解移注針の上下を持って注射用水ビン側を反時計回りにねじり、溶解移注針の中央部分から離すと差入口が現れます。

- 注射用水ビン側の溶解移注針を時計回りにねじった場合、溶解移注針の破損につながる場合があります。
- 清潔を保つために、シリンジの差入口に触れないように注意してください。

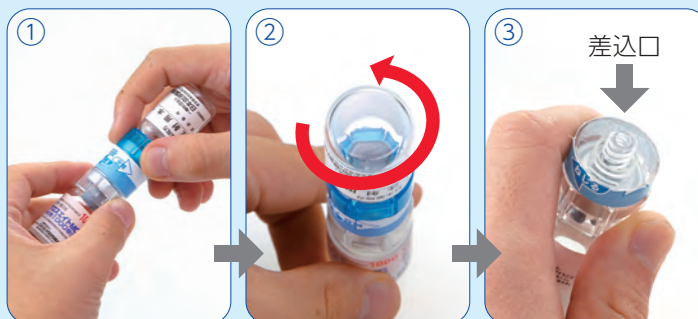

※製剤の溶解方法は輸注セットに添付の使用方法説明書をご参照ください。

変更品のお届け時期

変更品のお届け時期は2014年8月以降です。また、変更品の出荷時期は流通在庫の状況により多少前後することがありますので、ご了承ください。

